



Escanee el código con la cámara de su teléfono inteligente para ver el video de la colección de saliva.

El video también se puede ver en YouTube buscando "Video de la Colección de Saliva"

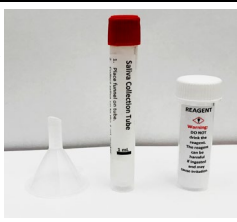

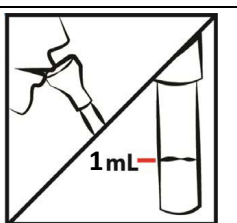
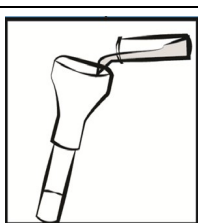
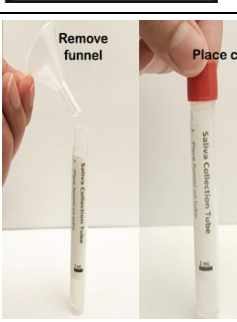

Descripción

- El kit de recolección de saliva ResourcePath garantiza la estabilidad de la muestra durante el almacenamiento y el transporte a temperatura ambiente sin necesidad de refrigeración o equipo especializado.
- El reactivo inactiva eficazmente los patógenos (p. Ej., Virus, bacterias) en las muestras recolectadas.

Al menos 30 minutos antes de planear recolectar su muestra, enjuague su boca con agua y no coma ni beba. Para obtener mejores resultados, asegúrese de estar hidratado el día que proporcione su muestra. Recomendamos beber mucha agua durante todo el día y un vaso de agua de 8 onzas 30 minutos antes de la recolección de la muestra.

Advertencias: NO tome ni toque la solución de reactivo. La solución de reactivo puede ser dañina si se ingiere y puede causar irritación si se expone a la piel y los ojos.

Instrucciones de recogida de muestras

<p>1</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Abra la bolsa que contiene el embudo, el tubo de recolección de saliva y el tubo de reactivo. 	<p>2</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Retire la tapa roja del tubo de recolección de saliva. • Coloque el embudo en el tubo de recolección de saliva.
<p>3</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Escupir en el tubo de recolección de saliva y llenar hasta el marcador de 1 ml. 	<p>4</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Abra el tubo de reactivo y vierta el contenido en el tubo de recolección de saliva con la muestra.
<p>5</p>		<ul style="list-style-type: none"> • Retirar el embudo. • Coloque la tapa roja en el tubo de recolección de saliva con fuerza. • Invierta el tubo 10 veces. 	<p>6</p>		<ul style="list-style-type: none"> • La muestra debe estar etiquetada con dos identificadores de paciente (Nombre y Apellido y Fecha de Nacimiento) • Coloque los formularios completos y la muestra en una bolsa de riesgo biológico. • Coloque la bolsa de riesgo biológico nuevamente en un sello de sobre grande y colóquelo en el dropbox.

TRANPORTE DE MUESTRAS

- El reactivo mantiene las muestras estables durante largos períodos de tiempo y las muestras pueden transportarse a temperatura ambiente.
- El laboratorio procesa muestras de lunes a viernes de 9:00 am a 5:00 y los sábados de 9:00am a 1:00pm.
- Las muestras se pueden dejar las 24 horas del día nuestro DropBox ubicado frente a nuestra oficina en la dirección que se indica a continuación.

Resourcepath, LLC
45945 Trefoil Lane. Suite 175
Sterling, VA 20166, USA
info@resourcepath.net
(571) 375-0755